

フォーケアクッション Basic 商品説明書

※取扱説明書と合わせてご確認ください。

1. クッションの使用事例

- 背もたれのある椅子もしくは座椅子、事務椅子や車のシートなどに使用することで、長時間の着座でも楽に座ることができます。
- 快適な使用感と長時間使用しても身体への負担がかかりにくいので様々な場面でご活用下さい。



2. フォーケアクッション Basic の商品説明

クッション外力カバーの表面（上面・前側・両横・後部）は、通気性の良いメッシュ生地を使用。裏面（底面）は、滑り止め加工を施した生地を使用しています。

(1) カバー表面のメッシュ生地は、通気重視

- ◆ 通気の良いメッシュ面は、クッション中材の体圧分散性を損なわず、座面や背面での使用時に、身体に触れる部分の蒸れを低減します。

(2) カバー裏面の生地は、使用時のクッションのズレを防止

- ◆ 座面や背面での使用時に、クッションがずれ難く姿勢保持をし易くするための滑り止め加工を施した生地を使用しています。

(3) クッションのお手入れ方法

- ◆ 外力カバーは、洗浄・洗濯ができます。
- ◆ 中材は、ウレタンで構成しており洗濯機で洗えません。洗う場合は、手洗い洗浄をします。※ウラ面の取扱説明書をご参照下さい。

(4) クッションの特長、使用時に留意していただきたい事項

- 前側と後ろ側の形状が違います。（縦幅：奥行41cm・横幅40cm）
 - ◆ 前側の角は直角で、後ろ側はなだらかな丸みがあります。
 - ★ 設置方向に注意してご使用下さい。ループやタグを目印にして下さい。
- 座面でのご使用：
 - 緑のタグ(黄色のループ側)を後ろにしてご使用ください。
 - ★ 前後が変わると座りごこちが悪くなり、効果が期待できません。
 - ◆ クッション材は、場所によって硬さが違います。前後を確認して下さい。
- 背あてでのご使用：
 - 緑のタグ(黄色のループ側)を上にとすると背を張って支えます。
 - ★ 猫背や円背の方は、緑のタグ(黄色のループ側)を下にとすると優しく支えます。
- 座面を椅子に固定する場合や座面と背あてを合わせて使用する場合に、座面後ろ側の黄色のループと座面前側の黒色のループをご活用下さい。

(外力カバー表:メッシュ面)



(外力カバー裏面:滑り止め面)




座面:後ろ側

〈座面:前側〉



〈座面:後ろ側〉

〈座面:前側〉

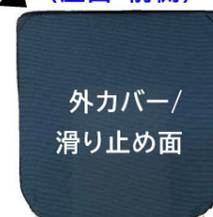


〈座面:後ろ側〉

3. クッション構造等の特長と使用説明


硬さの異なるウレタン素材(高反発素材)の分割配置構造により、快適な使用感が得られるように工夫したクッションです。クッション部材の構成及び部材の特長と使用方法は下記図をご参照下さい。

【クッション材分割の説明】①②③は硬い部材、④は柔らかい部材で構成しています。

【④の柔らかい部分は、座面後ろの緑色のタグも目印にして下さい。】

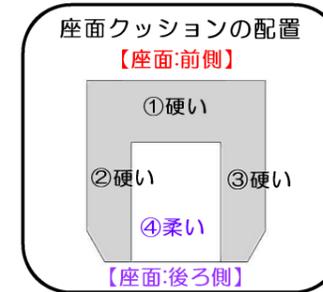



- 座面クッション使用方法
④を、座面の後ろ側に配置
座骨と座骨周囲の圧力を分散することができます。

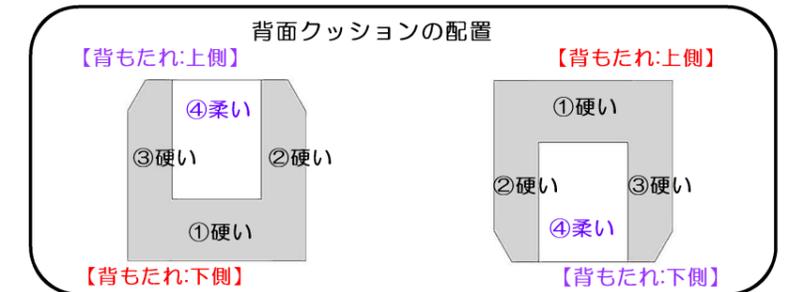

- 背面クッション使用方法(1)
④を、背面の上側に配置
①で骨盤を支えることで、背筋を伸ばした姿勢を支持しやすくします。
- 背面クッション使用方法(2)
④を、背面の下側に配置
骨盤が後傾している円背の方などの使用では、やさしく支えてくれます。


4. クッションの背と座の配置パターン

ご使用する椅子の形状や奥行に合わせて、下記クッションの配置を参考にしてください。座面と背面のセットでご使用いただくことで体圧分散と姿勢調節を効果的に行うことができますので、座位姿勢の保持と長時間使用時の臀部や腰、背中などの負担を軽減することができます。

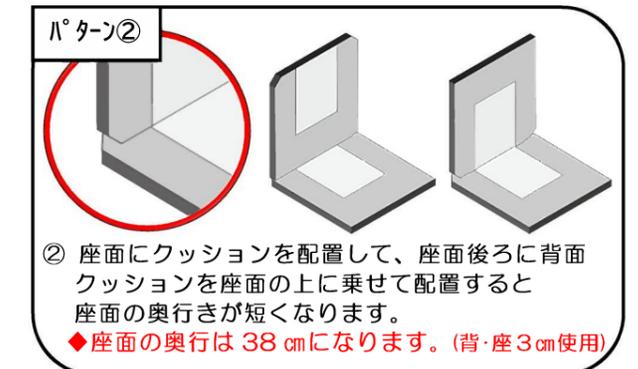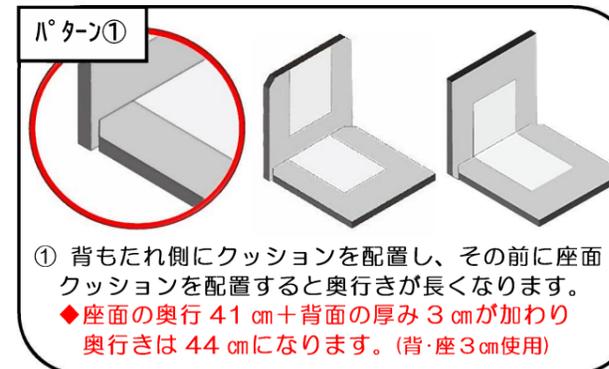

オススメ

2枚セットでのご使用をお勧めします!!

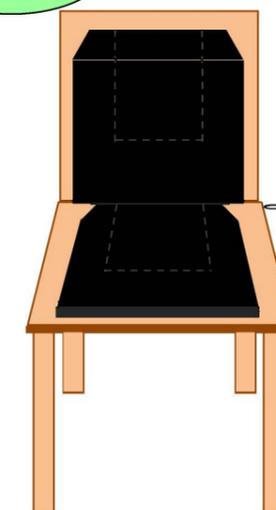

リラックスしたい時や猫背の方は上向き


優しく包み込む!

通常は下向き

背筋シャキッと!

座面は前向き

体圧分散!!

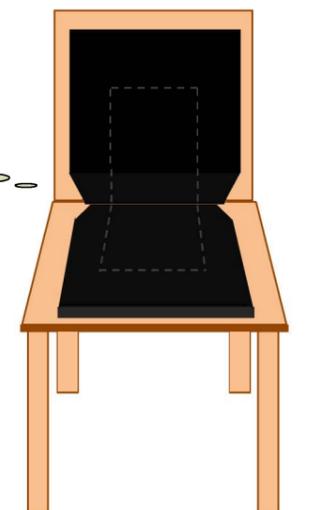

取り扱い説明書

- ・特許(フォーケアクション Pro)応用商品
- ・令和3年度九州地方発明表彰「大分県知事賞」受賞

《フォーケアクション Basic》

※商品説明書と合わせてご確認ください。

1. お手入れ方法

〔注意〕外カバーとクッション中材は、別々にお手入れをして下さい。

(1) [外カバー] のお手入れ

外カバーのファスナーを開けて、中からクッション中材を取り出します。

①外カバーのお手入れ方法

外カバーは、洗濯機で洗濯用洗剤等を使用して洗います。
メッシュ部分に入り込んだ糸くずなどのゴミは、掃除機で吸い取るかピンセットで取り除いて下さい。
乾燥機の使用も可能です。



ピンセットで糸くず
などを取り除く

(2) [クッション中材] のお手入れ

①外カバーのファスナーを開けて、クッション中材を取り出します。
・クッション中材は、硬さの異なるウレタン素材を接着しています。

②クッション中材に髪の毛等が侵入した場合は、ピンセット等で取り除きます。

③クッション中材の洗浄は、温水シャワーをかけてやさしく押し洗いします。

〔推奨〕汚れがある場合は、中性洗剤を使用して下さい。

〔注意〕次亜塩素酸(ハイター)のご使用はお控え下さい。

〔注意〕洗濯機は、ご使用にならないで下さい。

- ・遠心力により、ウレタン素材が破損する場合があります。
- ・接着面が剥がれる可能性があります。



④洗浄後、本体をやさしく振って水分をしっかりと切ります。

〔推奨〕この時、バスタオル等で挟んで叩くとより早く水切れします。

〔注意〕乾燥機は、ご使用にならないで下さい。


- ・遠心力により、ウレタン素材が破損する場合があります。
- ・接着面が剥がれる可能性があります。

⑤残った湿り気を、陰干しして乾かします。

〔推奨〕この時、扇風機等の風を当てると早く乾燥します。

〔注意〕天日で干すのは、おやめ下さい。

- ・クッション中材が黄色く変色し、クッション性が損なわれます。
- ・直射日光に当てると紫外線によって劣化が早くなります。
- ・しっかりと乾いたことを確認してからお使いください。

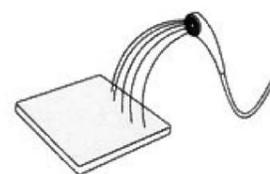

クッション中材をシャワーなどで
やさしく洗います

(3) [お手入れが終わったら、クッション中材を収納]

① 外カバーとクッション中材の形状を合わせ、収納してファスナーを閉めます。

〔注意〕ファスナーは最後までしっかりと閉め下さい。

- ・ファスナーや留め部分が、着衣に引っかかる恐れがあります。
- ・右記、説明写真をご参照下さい。

ファスナーはカチッと、
最後までしっかりと閉める



2. その他、注意点

- ・滑って転倒する可能性があるため、クッションの上に立たないで下さい。

フォーケアクション Basic を、ご購入いただき誠にありがとうございます。

長くご愛用いただくために、取り扱い説明書および商品説明書をよくご覧いただいた上でご使用ください。

10年ぶりに髪を染めたいと待ち望んでいた高齢のお客様と訪問美容師の会話です。
カラーの終わり際に「座っていて辛くありませんか？」の問いかけに「大丈夫ヨ♪このままパーマもかけて…♪」。
施設の担当者が、あの方は20分も座ると「痛い・痛い。ベッドに戻りたい…」と大変なの…。
その後、担当者が「パーマは次回にしましょうね。」と…。 お客様の、残念な想いが伝わってきました…

22年前の「キレイになりたい♪」との想いを形にしました！

弊社は訪問理美容の提供から、超高齢社会を背景に「モノが人に合わせる」をコンセプトに“人に優しい製品”の開発に取り組んでまいりましたが、きっかけは「快適に座れる専用車椅子」がないからでした。

なかでも体圧分散にこだわった多機能椅子のシート構造を、より多くの腰痛で悩む方々に提供できないかとの思いから、座と背に兼用できる体圧分散性の高いフォーケアクションを商品化しました。

座姿勢や姿勢保持などでの「座る辛さ」を少しでも心地よく、より快適に…。

◆姉妹品フォーケアクション Pro IIとの組み合わせもできます。



【お問い合わせ】

有限会社 ビューティフルライフ (TEL 097-546-0666 日祝除く 10:00~18:00)
〒870-0829 大分県大分市椎迫 4-2 お気軽にお問い合わせ下さい。

