

フォーケアクッション Pro Air 商品説明書

※取扱説明書と合わせてご確認ください。

1. クッションの使用事例

- (1) 背もたれのある椅子もしくは座椅子、事務椅子や車のシートなどに使用することで、長時間の着座でも楽に座ることができます。
- (2) 快適な使用感と長時間使用しても身体への負担がかかりにくいので様々な場面でご活用下さい。



2. フォーケアクッション ProAir の商品説明

クッション外カバーは両面通気性の良いメッシュ素材を使用しています。下記事項をご参考のうえご使用下さい。

(1) 素材について

- ◆ クッション外カバーは表面、裏面ともに通気性の良い W メッシュ素材です。
 - ・長時間使用していても熱がこもりにくく、エアシート搭載車にもご使用いただけます。
- ◆ クッション外カバーの裏面には縦 2 カ所に滑り止め加工をしております。
- ◆ 中材には 3D スプリングクッション材と薄い反発ウレタン材が入っています。
 - ・使用感の好みに応じて上下の重ね順を選択してください。
- ◆ クッションカバー、中材はすべて洗浄ができます。
 - ※ウラ面の取扱説明書をご参照下さい。

(外カバー:おもて面)
座面:前側



座面:後ろ側

(外カバー:うら面)



滑り止め

〈座面:前側〉

3Dスプリング
クッション材

反発ウレタン材

〈座面:後ろ側〉

〈座面:前側〉



〈座面:後ろ側〉

(2) 前側と後ろ側の形状が違います。(縦幅:奥行42cm・横幅45cm)

- ◆ 前側の角は直角で、後ろ側はなだらかな丸みがあります。
- ★ 設置方向に注意してご使用下さい。ループやタグを目印にして下さい。

(3) 座面でのご使用:

- 緑のタグ(黄色のループ側)を後ろにしてご使用ください。
- ★ 前後が変わると座りごこちが悪くなり、効果が期待できません。
- ◆ クッション材は、場所によって硬さが違います。前後を確認して下さい。

(4) 背あてでのご使用:

- 緑のタグ(黄色のループ側)を上にとすると背を張って支えます。
- ★ 猫背や円背の方は、緑のタグ(黄色のループ側)を下にとすると優しく支えます。


(5) 座面を椅子に固定する場合や座面と背あてを合わせて使用する際に、座面後ろ側の黄色のループと座面前側の黒色のループをご活用下さい。

3. クッション中材構造等の特長と使用説明 ※特許取得/TAIS 登録


特性の異なる 3D スプリング構造体(高反発素材)の分割配置構造により、快適な使用感が得られるように工夫したクッションです。クッション部材の構成及び部材の特長と使用方法は下記図をご参照下さい。

【クッション材分割の説明】①②③は硬い部材、④は柔らかい部材で構成しています。

【④の柔らかい部分は、座面後ろの緑色のタグも目印にして下さい。】

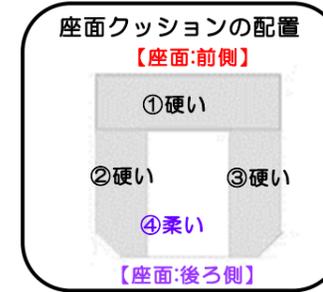


- 1.座面クッション使用方法
④を、座面の後ろ側に配置
座骨と座骨周囲の圧力を分散することができます。

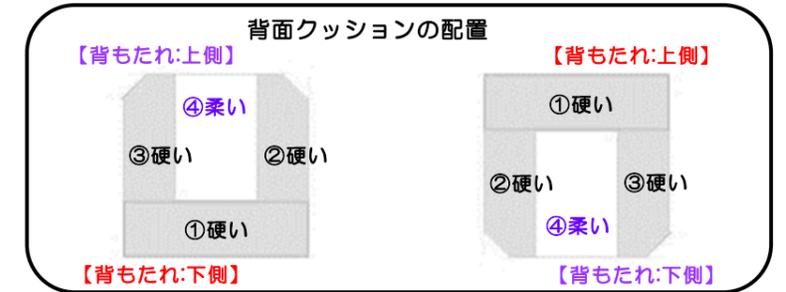


- 2.背面クッション使用方法(1)
④を、背面の上側に配置
①で骨盤を支えることで、背筋を伸ばした姿勢を支持しやすくします。
- 3.背面クッション使用方法(2)
④を、背面の下側に配置
骨盤が後傾している円背の方などの使用では、やさしく支えてくれます。

4. クッションの背と座の配置パターン

ご使用する椅子の形状や奥行に合わせて、下記クッションの配置を参考にご使用ください。座面と背面のセットでご使用いただくことで体圧分散と姿勢調節を効果的に行うことができますので、座位姿勢の保持と長時間使用時の臀部や腰、背中などの負担を軽減することができます。

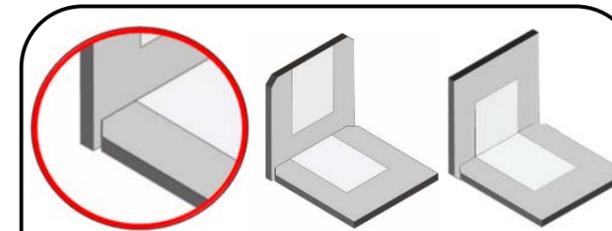


- 1.背もたれ側にクッションを配置し、その前に座面クッションを配置すると奥行きが長くなります。
 - ◆座面の奥行 42 cm + 背面の厚み 4.5 cm が加わり奥行きは 46.5 cm になります。

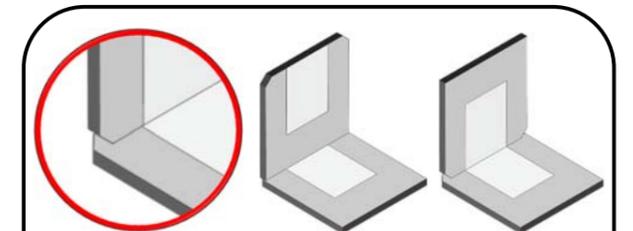

- 2.座面にクッションを配置して、座面後ろに背面クッションを座面の上に乗せて配置すると座面の奥行きが短くなります。
 - ◆座面の奥行は 37.5 cm になります。

おすすめ

2枚セットでのご使用をお勧めします!!

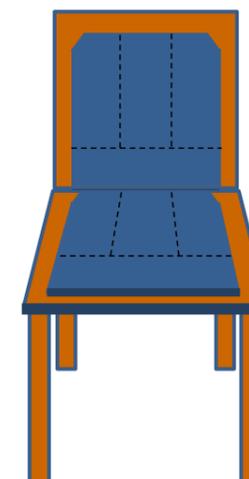

リラックスしたい時や猫背の方は上向き


優しく包み込む!

通常は下向き

背筋シャキッと!

座面は前向き

体圧分散!!

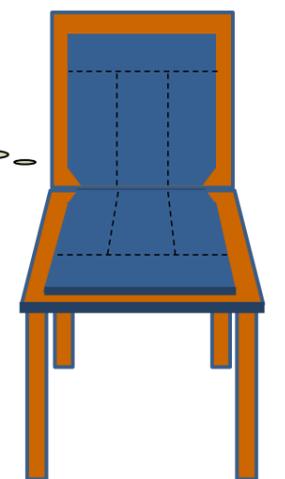

取り扱い説明書

- ・特許取得
- ・令和3年度九州地方発明表彰「大分県知事賞」受賞
- ・TAIS 登録(福祉用具情報システム)

《フォーケアクッション ProAir》

※商品説明書と合わせてご確認ください。

1. お手入れ方法

〔注意〕外カバーとクッション材・ウレタン材(1cm)は、別々にお手入れをして下さい。

(1) [外カバー] のお手入れ

クッション材・ウレタン材を取り出しクッションカバーと分離します。

外カバーは、洗濯機で洗濯用洗剤等を使用して洗います。
メッシュ部分に入り込んだ糸くずなどのゴミは、掃除機で吸い取るか
ピンセットで取り除いて下さい。
乾燥機の使用も可能です。



ピンセットで糸くず
などを取り除く




(2) [3Dスプリングクッション材] [反発ウレタン材]のお手入れ

①外カバーのファスナーを開けて、クッション材をそれぞれ取り出します。

・クッション材とウレタン材は別々にお手入れをしてください。



②3Dスプリングクッション材や反発ウレタン材に髪の毛等が侵入した場合は、ピンセット等で取り除きます。

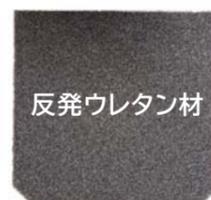

③温水シャワーをかけてやさしく押し洗います。

〔推奨〕汚れがある場合は、中性洗剤(ごく微量)を使用して下さい。

〔注意〕次亜塩素酸(ハイター)のご使用はお控え下さい。

・クッション材の制菌効果が失われます。

〔注意〕洗濯機は、ご使用にならないで下さい。

・軽量で高反発のクッション材が洗濯機内で広がり、破損する場合があります。

④洗浄後、本体をやさしく振って水分をしっかりと切ります。

〔推奨〕この時、バスタオル等で挟んで叩くとより早く水切れします。




⑥残った湿り気を、陰干しして乾かします。

〔推奨〕この時、扇風機等の風を当てると早く乾燥します。

〔注意〕天日で干すのは、おやめ下さい。

・クッション材が黄色く変色し、クッション性が損なわれます。

・直射日光に当てると紫外線によって劣化が早くなります。

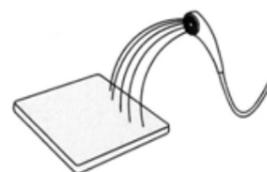

(3) [お手入れが終わったら、クッション材とウレタン材を収納]

①クッションカバーに3Dスプリングクッション材と反発ウレタン材を収納して完了です。

〔注意〕ファスナーは最後までしっかりとお閉め下さい。

・ファスナーや留め部分が、着衣に引っかかる恐れがあります。

ファスナーはカチッと、
最後までしっかり閉める



②中材の重ね順はお好みや使用感に応じて選択してください。

・3Dスプリングクッション材を座面側に入れると
構造体(高反発素材)の分割配置構造をより体感できます。

・反発ウレタン材を座面側に入れると肌あたりがよりソフトになります。

3Dスプリングクッション材

反発ウレタン材



2. その他の情報・注意点

(1) 滑って転倒する可能性があるため、クッションの上に立たないで下さい。

(2) 3Dスプリングクッション材は、抗菌より強いSEK レッドラベルの制菌加工を
素材に施しております。

・黄色ぶどう球菌やMRSAもほとんど検出されない高い制菌性を
長期間保ちます。

(3) 防水面の素材には、SEK オレンジラベルの制菌加工を施しております。

・黄色ぶどう球菌・肺炎杆菌等がほとんど検出されない高い制菌性を
長期間保ちます。



(4) 70℃以上になると少しずつ柔らかくなる為、中身が熱くなっている時は、伸ばしたり、
曲げたり、物を載せたりしないで下さい。乾かすなどで火元に近づけないで下さい。

(5) 長期間の使用や頻りに洗浄されると徐々に柔らかくなりますが、バネ弾性で支える構造
ですので効果はほとんど変わりません。

フォーケアクッション ProAir を、ご購入いただき誠にありがとうございます。
長くご愛用いただくために、取り扱い説明書および商品説明書をよくご覧いただいた上でご使用ください。

10年ぶりに髪を染めたいと待ち望んでいた高齢のお客様と訪問美容師の会話です。
カラーの終わり際に「座っていて辛くありませんか？」の問いかけに「大丈夫♪このままパーマもかけて…♪」。
施設の担当者が、あの方は20分も座ると「痛い・痛い。ベッドに戻りたい…」と大変なの…。
その後、担当者が「パーマは次回にしましょうね。」と…。 お客様の、残念な想いが伝わってきました…。
22年前の「キレイになりたい♪」との想いを形にしました！

弊社は訪問理美容の提供から、超高齢社会を背景に「モノが人に合わせる」をコンセプトに“人に優しい製品”
の開発に取り組んでまいりましたが、きっかけは「快適に座れる専用車椅子」がないからでした。

なかでも体圧分散にこだわった多機能椅子のシート構造を、より多くの腰痛で悩む方々に提供できないかとの
思いから、座と背に兼用できる体圧分散性の高いフォーケアクッション Pro を商品化しました。

座姿勢や姿勢保持などでの「座る辛さ」を少しでも心地よく、より快適に…。

◆厚さが選べる姉妹品フォーケアクッション Basic・姿勢保持クッションとの組み合わせもできます。

【お問い合わせ】

有限会社 ビューティフルライフ (TEL 097-546-0666 日祝除く 10:00~18:00)

〒870-0829 大分県大分市椎迫4-2 お気軽にお問い合わせ下さい。

