

# フォーケア ツインピース® 商品説明書

姿勢保持クッション

※取扱説明書と合わせてご確認ください。

・特許申請中  
・TAIS 登録：福祉用具情報システム (公財)テクノエイド協会

1. はじめにご確認ください。S/M サイズの仕様…裏面の取扱説明書の1. をご参照ください。

2. フォーケア ツインピース® 姿勢保持クッション の使用事例

【基本：使用例】 ※外カバー色：ブラック ※ファスナー色：グリーン(Sサイズ)、オレンジ(Mサイズ)



椅子背部 椅子座面 椅子(背あて) 車椅子(背のみ/背・座使用) 自動車

【応用：使用例】 【注意】座面に配置する際は、尾骨周辺にホック留が重ならないように上面(帯部ポケット)を座面前側に設置してください。



N字折り M字折り(表面) M字折り(裏面) 座と背(2個使用)



背部(背あて: 2個使用) 頸部枕 頸部・頭部枕 M字:枕 M字:背あて

枕使用時の《ポイント》 中材(小ピース)を片方の膨らみ部の左右に丸めて挿入すると、枕の中央が凹み後頭部に添い易くなります。

## 【クッション変形の事例】

折り方(変形)の参考事例です。中材の出し入れや調整ピースの挿入数、折り畳み方法や巻き込み方法で様々な使用方法をお試しください。



◆背面に使用 ◆座面に使用



◆N字折り背面に使用 ◆M字折り座面・背面背あてに使用



◆膨らみ部を巻き込んで使用 ◆背面と座面2枚使用

## 3. 【体圧分散効果】ツインピース®(背面)、クッションPro プラス(座面)で体圧分散を計測!

### 【背面の比較】

椅子のみでは、腰部の支えが無く背中上部で支えている。ツインピース使用後は、腰から背中、腰から脇まで広い範囲で体幹を支えているため圧力分散しており、姿勢がしっかり保持されています。


### 【座面の比較】

椅子のみでは、座骨周辺に圧力が集中しています。ツインピース使用後は、座骨・仙骨への圧力が軽減され、大腿部の広い範囲に圧力が分散されて座る負担が軽減されています。

### 【総合評価】

体圧分散記録の比較で、ツインピースを使用者の座位姿勢や座り方に合わせて使用することで、圧分散ができ、楽に座れることが解ります。使用者が使う椅子や自動車に合わせて選択し、使用例のような様々な応用をすることで、腰痛をなくし楽に座りましょう!

同) KT 福祉環境研究所 松尾清美

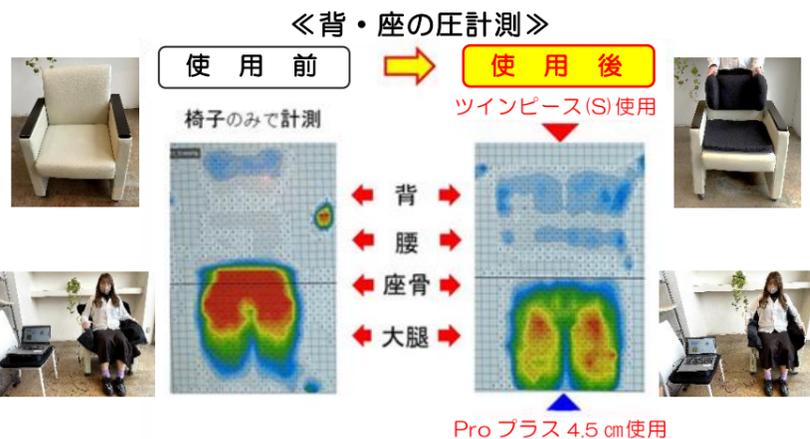

## 4. 商品説明

### (1) 各部の名称



### (2) 素材について

- 1) 通気重視の外カバーと中材カバー(充填物収納用カバー)
  - ①外カバーWメッシュ生地：体圧分散性を損なわず、ズレを防止し通気性の良い生地を使用。
  - ②中材カバー生地：通気性の良い生地を使用。
- 2) 独自素材の中材(中材カバー内の充填物)…膨らみ部および帯部共通
  - ①通気性の良い特殊フィルムを貼り合わせ、独自の強度と柔らかさ、耐久性を兼ね備えた特殊加工ウレタンラミカットチップ(以下、オリジナルチップ)を使用。
  - ②大・中の中材カバー内には、オリジナルチップに加え通気性の良い反発ウレタン柱を組み込んでおり、身体をしっかり支え蒸れを低減します。



### (3) 膨らみ部の大きさ調整と特長 ◆はじめに裏面取扱説明書1. の中材(ピース)の種類をご参照ください。

1) 左右膨らみ部の調整：中材(小ピース)を出し入れし膨らみ部の大きさ調整をします。

- ◆ 身体の体形(大きさ)や使用する椅子等の幅に合わせて、左右の大きさを調整してください。
- ◆ お好みの姿勢や身体の状態に合わせて、左右の大きさを変えることができます。
- ・ 膨らみ(支え)具合を更に増したい時は、別売の中材(小ピース)を追加することもできます。

※裏面、取扱説明書の、1. または3. の、別売をご参照ください。

#### 【調整のポイント】

- ・ 膨らみ部を揉みこむことで、中材(ピース)のなじみが良くなります。
- ・ 左右の膨らみ部内の中材(小ピース)を出し入れすることで、膨らみ部の大きさ(膨らみ具合)を調整できます。※中材(小ピース)を取り出すことで膨らみ部を小さくできます。
- ・ 身体の状態(左右の傾きなどのバランス)により、片方のみ減らして使用することもできます。

2) 帯ピースの調整：帯ピースの出し入れ ※帯ピース(別売)を追加して厚みを増せます。(裏面の別売をご参照ください。)

- ◆ 帯ピースあり：背や座に敷いた際にクッション性がアップします。
- ・ 帯部の左右や上下に折りたたんで体形や椅子の幅に合わせることができます。
- ◆ 帯ピースなし：帯部が薄くなり①膨らみ部を帯部に巻く、②内側や外側に折り込む、③N字折りに変形するなど、形状を容易に変えることができます。

3) 外カバーのWメッシュ生地は、使用時のズレを防止

- ◆ 帯部と膨らみ部が身体と椅子等に密着した際、クッションがズレ難く姿勢を保持し易くなります。
- ◆ 中材の体圧分散効果を損なわず、身体の触れる部分の蒸れを低減します。

4) ファスナー (S/M サイズ共通)

- ◆ ファスナーは、樹脂部分がフラットなものを採用しています。
- 【注意】ファスナーを収納袋までしっかり閉めて収めてください。
- ◆ 装着時ファスナー樹脂が引っかかったり、圧迫を防ぐため収納袋を深めにしています。
- 【ポイント】ファスナー裏あて生地を、抑えながら閉めると収納動作がスムーズです。
- ◆ 外カバー開閉時に中材の噛み込みを防ぐ、ファスナー裏あて生地を設けています。



5) ループ(4カ所)の使用法

- お手持ちのひもやマジックテープベルトを通して椅子等の背もたれに固定することができます。
- ◆ 椅子等の背もたれから落ちることを防ぎ、椅子等に固定できます。

(4) お手入れ方法・・・裏面の取扱説明書をご参照ください。


# 取扱説明書〈お手入れ方法〉

長くご愛用いただくために、取扱説明書および商品説明書をよくご覧いただいた上でご使用ください。

## 〈フォーケア ツインピース® : 姿勢保持クッション〉 S/Mサイズ

### 1. S/Mサイズの仕様…はじめにご確認ください。

<b>Sサイズ (裏面)</b>  【サイズ* : 横幅 71.5 cm × 縦 31.5 cm 膨らみ部 : 幅 16.5 cm】	<ul style="list-style-type: none"><li>・外カバー×1</li><li>・中材(計7ピース) Sピース×2 調整ピース×2 帯ピース×1</li></ul>
<b>Mサイズ (裏面)</b>  【サイズ* : 横幅 76 cm × 縦 32 cm 膨らみ部 : 幅 19.5 cm】	<ul style="list-style-type: none"><li>・外カバー×1</li><li>・中材(計7ピース) Mピース×2 調整ピース×2 帯ピース×1</li></ul>

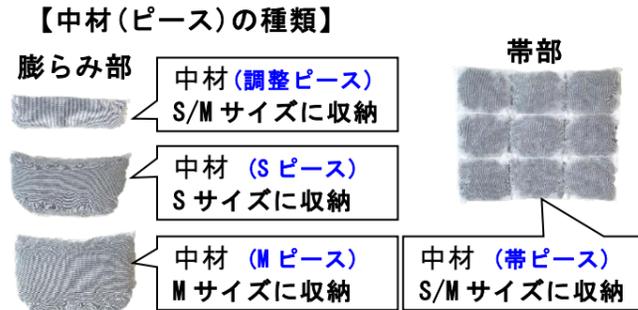


- 【追加オプション】(別売) ※S/Mサイズ共通
- ① 調整ピース…膨らみ部の膨らみ(支え)具合を増したい時に追加することができます。
  - ① 帯ピース…帯部にもう一枚追加すると、クッション性が高まります。

### 2. お手入れ方法

〔注意〕外カバーと膨らみ部と帯部の中材(ピース)は、別々に洗濯や乾燥をしてください。

・外カバーと中材(ピース)のお手入れ方法は異なります。各お手入れ方法をご確認ください。

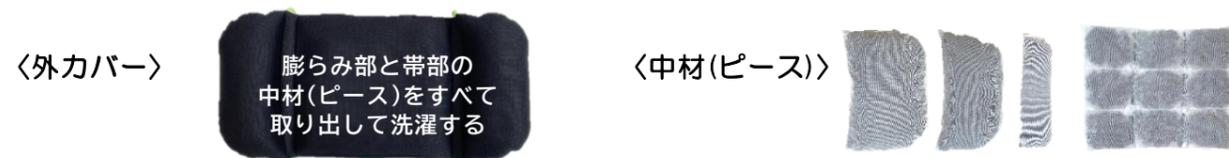

#### (1) [ 外カバー ] のお手入れ

##### 1) 外カバーの洗濯方法

〈洗濯〉外カバーは、洗濯ネットに収納して洗濯をしてください。

洗濯機で洗濯用洗剤を使用して洗います。

〔注意〕中材(ピース)を挿入したまま洗濯をすると汚れ落ちが低下し乾きが遅くなります。

〈乾燥〉推奨：脱水をした後に陰干しで乾かすことをお勧めします。

乾燥機を使用する際は、低温での乾燥をお勧めします。

〔注意〕生地劣化を防ぐため、高温での乾燥機使用や長時間の乾燥はお控えください。

##### 2) 洗濯以外のお手入れ方法

- ・メッシュ部分に入り込んだ糸くずなどのゴミ、ホコリは、掃除機で吸い取るかピンセットで取り除いてください。
- ・洗濯ネットに収納して乾燥機でホコリなどを取り除くことも可能です。

ピンセットで糸くずやゴミなどを取り除く

#### (2) [ 中材(ピース) ] のお手入れ

外カバーの左右膨らみ部と帯部から、中材(ピース)を取り出します。

【重要・注意】中材カバーの中からオリジナルチップなどの充填物を取り出さないでください。

- ・中材(ピース)内に独自素材の特殊加工ウレタンラミカットチップ(オリジナルチップ)を充填していますので、中材カバーの中から取り出して洗濯や洗浄した場合、その後の修復ができません。

#### 1) 中材(ピース)の洗濯方法

〈洗濯(1)推奨〉手洗い：中材カバーごと洗濯洗剤をごく微量使用して手で押し洗いをします。

- ・押し洗いは、オリジナルチップの強度を長持ちさせることができます。

〈洗濯(2)〉洗濯機使用：中材カバーごと洗濯ネットに収納し、ごく微量の洗濯用洗剤で洗います。

- ・オリジナルチップの発泡内に洗剤を残さず、長持ちさせることができます。

〔注意〕次亜塩素酸(ハイター)のご使用はお控えください。

- ・オリジナルチップの接着部が剥がれたりして強度が弱くなります。

#### 2) 中材(ピース)の乾燥方法

〈乾燥機を使用〉低温での乾燥をお勧めします。

〔注意〕生地劣化を防ぐため、高温での乾燥機使用や長時間の乾燥はお控えください。

〈乾燥機を使用しない：推奨〉脱水をした後に、陰干しで乾かします。

〔注意〕天日で干すのは、しないでください。

- ・直射日光に当てると紫外線によって劣化が早くなります。

① 中材(各ピース)の洗濯・水切り後に、水分がよく切れているか確認します。

〔推奨〕この時、バスタオル等で挟んで叩くとより早く水切れします。

② 残った湿り気を、陰干しして乾かします。

〔推奨〕この時、扇風機等の風を当てると早く乾燥します。

#### (3) [ お手入れが終わったら ]

1) しっかり乾いたことを確認してからご使用ください。


2) 外カバー内に中材(各ピース)を収納してファスナーを閉めます。

- ・ファスナーが着衣に触れにくいように、収納袋は深めにしています。

〔注意〕ファスナーは最後までしっかりと、収納袋まで閉めてください。

- ・ファスナーや留め部が、着衣に引っかかる恐れがあります。

ファスナーは、最後までしっかり閉めて収める

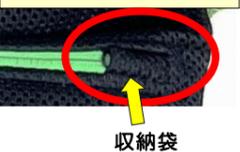

#### 3. もう少し膨らみ(支え)具合が欲しい時。クッションがへたったと感じたら。

・中材(小ピース・帯ピース)(2タイプのみ別売)を、左右の膨らみ部や帯部に追加することにより膨らみ(支え)具合を増すことができます。※下記、お問合せ先にご連絡ください。

#### 4. その他の注意点

- ・滑って転倒する可能性があるため、本クッションの上に立たないでください。

フォーケア ツインピース®を、ご購入いただき誠にありがとうございます。

「モノが人に合わせる」をコンセプトに「人に優しい製品」開発に取り組んでおります。座姿勢や姿勢保持などでの「辛さ」を…。より心地よく、より快適に…。

このテーマを基に、座と背に兼用できる体圧分散性の高いフォーケアクッション Pro シリーズ&Basic を商品化しました。

さらに座姿勢やベッドでの姿勢の保持を「より快適に・安定する」をテーマに考案した商品がフォーケアクッション ツインピースです。

「座る」時や「くつろぐ」時に辛いと感じる方へ、座りの改善や生活に貢献できることを願っております。

◆姉妹品フォーケアクッション Pro シリーズ&Basic(体圧分散クッション)との組み合わせもお勧めします。

【お問い合わせ】

有限会社 ビューティフルライフ (TEL 097-546-0666 日祝除く 10:00~18:00)

〒870-0829 大分県大分市椎迫 4-2 お気軽にお問い合わせください。